

Protocollo contorno occhi
integrato con **Abilast® Siero**
e radiofrequenza bipolare



HYPERION

Generatore di radiofrequenza

Sistema innovativo per il ringiovanimento
cutaneo, la patologia vascolare
e la chirurgia ambulatoriale



GIEFFE srl - Via Vespucci, 22 - 10128 Torino (Italy)
Tel. +39 011 595 080 - Fax +39 011 597 226
info@gieffemedical.com - www.gieffemedical.com



SCHARPER
Divisione
Dermatologica

SCHARPER THERAPEUTICS srl
Viale Ortles 12 - 20139 Milano
Tel +39 02 26 29 161 - Fax +39 02 24 01 180

skincare@scharpertherapeutics.it - www.scharperderma.it

Protocollo contorno occhi

Un protocollo integrato con siero anti-age e radiofrequenza bipolare per il trattamento del contorno occhi

Dott. Francesco Mazarella, Bari

Scopo

Al fine di individuare una metodica che possa coniugare efficacia e delicatezza, raggiungere strati dermici più profondi ed aumentare la compliance del paziente, abbiamo sviluppato una procedura combinata che abbia un razionale terapeutico nel trattamento dell'invecchiamento cutaneo del "contorno occhi".

Metodo

Nella nostra casistica - 20 pazienti di sesso femminile, di età compresa tra 39 e 73 anni - abbiamo associato l'utilizzo ambulatoriale di un generatore di radiofrequenza bipolare iperpulsato a 2.0 MHz (Hyperion), con l'applicazione durante, post-trattamento e domiciliare di un siero anti-age (Abilast® Siero) con azioni: **idratante** (a breve e lungo termine), garantita dall'associazione di 2 macropolimeri (acido ialuronico e xiloglucani di Tamarindo); **antiossidante**, grazie al complesso formato dai liposomi di superossido dismutasi con tocotrienoli da olio di palma e procianidine da semi d'uva; **anti-aging**, data dall'associazione tra acidi Boswellici e il complesso brevettato Esacur®.

La procedura ambulatoriale prevede l'applicazione del siero sull'area d'intervento e, tramite il **manipolo bipolare** dedicato **Aesthetic Nano** (Ø 10 mm), l'emissione della radiofrequenza tramite movimenti circolari sino alla comparsa di eritema e di intenso calore indotto (end-point). I parametri operativi impostati sul generatore sono: potenza 10 W, durata dell'impulso 1 ms e frequenza di ripetizione dell'impulso tra 60 e 100 Hz.

In tal modo, in virtù dell'azione di depolarizzazione di membrana della radiofrequenza, è possibile favorire la penetrazione dei principi attivi del siero.

Il protocollo operativo prevede l'esecuzione di un totale di 6 sedute, in media, (4-8, in relazione alla profondità delle rughe da trattare), una a settimana. La durata del trattamento è di circa 2-3 minuti per lato.

Il paziente dovrà continuare l'applicazione domiciliare del siero anti-age, due volte al giorno,

mattina e sera, per l'intera durata del protocollo e per le successive 8 settimane.


Risultati

La metodica si è dimostrata ben tollerata dal paziente e molto apprezzata dal medico per i pochi rischi di effetti indesiderati, quali modesto edema ed eritema, della durata di circa 24-48 ore.

I risultati ottenuti, in tutti i pazienti trattati, sono stati:

- ❖ riduzione della profondità delle rughe periorculari;
- ❖ miglioramento della tessitura cutanea;
- ❖ miglioramento dell'elasticità cutanea;
- ❖ riduzione delle c.d. borse oculari.

Alla luce di questa esigua ma promettente esperienza, dell'assoluta sicurezza ed in ragione del fatto che tale trattamento può essere effettuato anche nel periodo estivo, perché compatibile con l'esposizione solare, si ritiene che questa metodica possa costituire un valido ausilio terapeutico nel trattamento dell'aging e del fotoaging della regione periorculare.

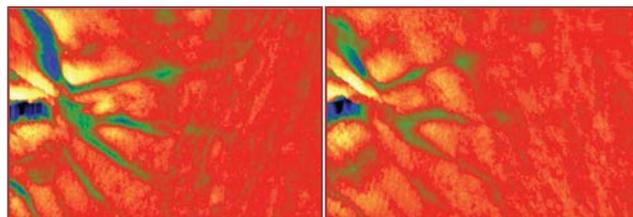

Miglioramento dell'elasticità e della compattezza cutanea dopo 2 settimane di trattamento.



Donna, 69 anni - prima del trattamento. 4 settimane dopo la fine del trattamento (6 sedute, una a settimana) evidente riduzione della profondità delle rughe periorculari e compattamento della tessitura cutanea.